

SE  
Kool Dam

## PRODUKTBESKRIVNING

Ljushärdande flytande kofferdam och block-out resin, utan värmeutveckling.

## INDIKATIONER

Blekning: För skydd av mjukvävnad vid blekningsbehandlingar.

Block-out resin: För att blockera bort underskär och tandköttsfickor före avtryckstagning.

Blästring: För att skydda mjukvävnad och maskera tandytor vid sandblästringsbehandling.

## KONTRAIKATIONER

Ersätter ej kofferdam vid endodontibehandling.

## BRUKSANVISNING

1. Applicera och säkra en 18G eller 20G kanyl på luer-lock sprutan.
2. Applicera ett 1-2 mm tjockt lager Kool-Dam på mjukvävnad eller tandyta som ska skyddas innan behandling som kräver intraoralt skydd påbörjas, eller applicera på ytor som behöver blockeras före avtryckstagning. Kool-Dam rinner inte och kan appliceras på multipla tänder innan härdning. Sätt på korken på sprutan omedelbart efter användning.
3. Ljushärda 10 sekunder, beroende på vilken ljuskälla som används.

## VARNING

Ohärdat material kan orsaka irritation i ögon eller på hud vid kontakt. Dental personal bör bära skyddsglasögon och handskar. Överskrid inte tillverkarens rekommenderade härdtid för den härdljuslampa som används.

## LAGRING OCH HANTERING

- Förvaras tätt försluten i originalförpackningen vid sval rumstemperatur. Undvik direkt ljus, extrema temperaturer, föroreningar och antändningskällor.
- Hållbarhet för öppnad produkt: 2 år från tillverkningsdatum
- Sätt på kork omedelbart efter användning.

**Obs:** Applicera engångsbarriärskydd över dispenseringsutrustning för flergångsbruk, före användning på patient. För mer information, se: <https://www.fda.gov/medical-devices/dentaldevices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

## RAPPORTERING AV ALLVARLIGA INCIDENTER/TILLBUD

Alla allvarliga incidenter som involverar produkten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där händelsen inträffade eller till annat lämpligt tillsynsorgan. Rapporter om allvarliga incidenter ska skickas till:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

email: [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)

**Not:** Se säkerhetsdatablad för en lista över material/ämnen som finns i denna produkt.